









Egalement disponible en vrac dans la version ID Expert Light

Référence	Produit	Absorption	Pièces par sachet	Sachets par carton	Code EAN13
5160030281	iD Expert Light	Normal  	28	12	5414874005798
5160040281	iD Expert Light	Extra  	28	10	5414874005811
5160050281	iD Expert Light	Maxi  	28	8	5414874005811



Système d'odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniaque et donc, d'odeurs embarrassantes.



Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multicouches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».



La forme du produit combinée aux élastiques assure une adaptation anatomique au corps pour un confort et une discrétion optimale.



Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimale.



Tous les produits ID sont testés sous contrôle dermatologique, afin de limiter les risques d'irritation cutanée.



Tous nos produits sont sans latex.



Additif à la camomille, reconnue pour ses propriétés apaisantes.



Les protections sont en emballage individuel (sauf Ultra Mini).



Déplier la protection afin qu'elle soit douce et plate, puis pliez-la en deux sur la longueur afin de former une «gouttière» au milieu de la protection. Enlever le papier de la bande adhésive.



Coller la protection dans la zone de l'entrejambe en vous assurant de bien la positionner afin que l'urine puisse se diriger dans la zone centrale de la protection.



Remonter votre sous-vêtement en vous assurant que la nouvelle protection est bien maintenue en place et est bien positionnée au niveau de l'aîne.